


Urenstand uitlezen op Breas CPAP APP PV10 (010018)

Stap 1:

- Zet het apparaat aan door op de in-/uitschakelknop te drukken.
- Druk vervolgens de functieknop in  in, totdat het zandloper figuurtje onderaan de display gaat branden en de totale urenstand op het scherm verschijnt.*

*Als de totale urenstand meer is dan 10.000 uur, geeft de display eerst het aantal bedrijfsuren in duizenden weer, gevolgd door het aantal in tienduizenden. Bijvoorbeeld: 12.345 uur wordt weergegeven als 2345 gevolgd door 01.



Stap 2:

- Noteer de urenstand op de antwoordkaart en stuur deze retour naar Mediq Tefa.