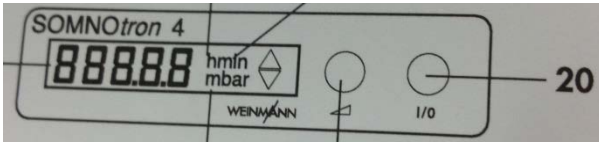


Urenstand uitlezen op Weinmann SOMNOtron 4(SOMNOTRON4)

<p>Stap 1:</p>	<ul style="list-style-type: none"> Zet het apparaat aan door middel van de in-/uitschakeltoets (20). 	
<p>Stap 2:</p>	<ul style="list-style-type: none"> Om de totale urenstand zichtbaar te maken, dient u het apparaat weer uit te schakelen. Houdt u bij het uitschakelen van het apparaat de in-/uitschakeltoets (20) langere tijd ingedrukt, totdat de totale urenstand op de display verschijnt. 	
<p>Stap 3:</p>	<ul style="list-style-type: none"> Noteer de totale urenstand op de antwoordkaart en stuur deze retour naar Mediq Tefa. 	