






Enterale voedingspomp: Beknopte bedieningshandleiding

Toedieningsset in de pomp plaatsen

- Pompdeur met de deurendel ontgrendelen en openen
- Klem pijlmarkering, met klemhendel naar boven, in de uitsparing plaatsen
- Toedieningssysteem zonder spanning in de onderste geleiding fixeren
- De pompdeur dichtdrukken en daarbij op het vergrendelen letten



Opstarten

| | | |
|--|----|--|
|  | 1 | Pomp inschakelen Toets gedurende enkele seconden indrukken. |
|  | 2 | Programma keuze (zie pag 3) Continu (__) Volume/tijd (_Π_) Bolus (Π_Π_) |
|  | 3 | Toedieningssysteem vullen Toets ingedrukt houden (600ml/uur). |
|  | 4 | Instellen van loopsnelheid, volume etc. |
|  | 5 | Doelvolumen instellen (De-)aktiveren toetsen gelijktijdig indrukken. |
|  | 6 | Start/Stop programma |
|  | 7 | Informatie toegediend/nog toe te dienen volume -Stilstand: Σ: som van toegediend volume. -In werking: Σ- : nog toe te dienen volume. -Reset: 3 seconden indrukken. |
|  | 8 | Toetsenbord blokkeren/vrijgeven (code 7) |
|  | 9 | Instellen alarm-interval (code 15) Normaal 30 sec. (instelbaar 5-300 sec.). |
|  | 10 | Instellen (alarm)volumen (3 standen) |
|  | 11 | Terugzetten fabrieksinstelling (reset) Toetsen gelijktijdig indrukken. |

Gekozen programma

Continu ___ :



1. Druk op  totdat  op het scherm staat
2. Gewenste snelheid instellen  (rate 1-600ml/u.)
3. Doelvolumen instellen  (1-5000ml)
4. Druk op start 

Volume/tijd II



1. Druk op  totdat  op het scherm staat
2. Instellen van de gewenste tijd  (🕒 1-24 uur)
3. Doelvolumen instellen  (1-5000ml)
4. Druk op start 

Bolus II II



1. Druk op  totdat  op het scherm staat
2. Gewenste dosis instellen  (DOSE 1-600ml)
3. Instellen van het interval  (🕒 1-24 uur)
(pomp kent vaste inloopsnelheid van 600ml/uur !!!)
4. Doelvolumen instellen  (1-5000ml)
5. Druk op start 

Voorbeeld: Doelvolumen 1500ml. Bolusdosis 300ml. Interval 1,5 uur

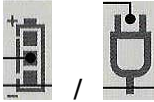









Start: Pomp geeft 300ml in 30 min (600ml/uur)

Pauze (interval 1,5 uur) 1 uur

Pomp geeft 300ml in 30 min (600ml/uur)

Pauze 1 uur enz, totdat doelvolumen bereikt is.

Overzicht alarm

| Alarm | Symbol | Maatregel |
|---|---|--|
| Batterij/Netspanning |  | Display geeft de gebruikte bron aan. Batterij kent een indicator (3,2,1,streepje). |
| Batterij pre-alarm (<30 minuten) | 6 piepjes/30 sec knipperende display | Netspanning. (tijdsinterval instelbaar) |
| Batterij alarm (leeg) | Piepjes, knipperen- de display | Pomp schakelt uit na 10 minuten → op netspanning aansluiten. |
| Doelvolum bereikt |  | Toediening beëindigen of voortzetten. |
| Toedieningssysteem leeg |  | - Toediening voortzetten. - Toediening beëindigen en sonde spoelen. - Toedieningssysteem vullen. |
| Upstream occlusie (verstopping/afknelling lijn boven de pomp) |  | Verwijder de verstopping of afknelling boven de pomp. |
| Downstream occlusie (verstopping/afknelling lijn onder de pomp) |  | Verwijder de verstopping of afknelling onder de pomp. |
| Toedieningssysteem |  | - APPLIX toedieningssysteem. - Toedieningssysteem correct invoeren. |
| Pompdeur open |  | Pompdeur sluiten. |
| Blokkade transport-mechanisme |  | Direct contact opnemen met technische service. |
| Systeemfout |  | Direct contact opnemen met technische service. |
| Herinnering akoestisch alarm |  | - Standby alarm, elke 60 sec. (3 piepjes) - Ander alarm, elke 30 sec. (instelbaar) |

**Alarm met de Stop/Start-toets beëindigen.
Oorzaak van het alarm beëindigen.
Toediening met de Stop/Start-toets opnieuw starten**